

Pathologie Luzern
Molekularpathologie
Prof. Dr. med. Joachim Diebold
Telefon 041 205 34 71
Fax 041 - 205 34 96
6000 Luzern 16
pathologie@luks.ch

Liquid Biopsy - Technische Informationen zu Entnahme und Transport von Blutproben bei Patientinnen und Patienten mit soliden Tumoren

Sie erhalten die für den Versand mit der **Schweizer Post vorfrankierten** Transportboxen für die Blutproben unentgeltlich direkt vom USZ-Labor (Bestellung an fmi.pathologie@usz.ch) oder von uns (Bestellung telefonisch 041 205 34 71 oder [online](#)). Der Bericht wird per E-Mail direkt vom USZ-Labor an den bestellenden Arzt/Ärztin versendet. Die LUKS Pathologie erhält eine Kopie des Berichts.

Wichtige Informationen zur Handhabung der Blutproben

- Die Blutentnahme von peripherem Vollblut so planen, dass die entnommenen Proben noch am gleichen Tag verschickt werden. Das Vollblut muss innerhalb von max. 7 Tagen ab dem Zeitpunkt der Blutabnahme im USZ-Labor eingehen.
- Freitags, an Wochenenden, an Feiertagen und am Tag vor einem Feiertag ist es ratsam keine Blutproben zu entnehmen. Falls dies doch erforderlich wird, so lagern Sie diese an einem schattigen Platz bei Raumtemperatur bis zum Versand am nächsten Werktag. Das USZ-Labor kann Blutproben an Wochenendtagen oder Feiertagen nicht entgegennehmen.
- Die Proben dürfen nicht gekühlt oder eingefroren werden.
- Für die Probenentnahme dürfen ausschliesslich die mitgelieferten Roche-Röhrchen verwendet werden. Die Röhrchen enthalten Stabilisatoren, weshalb ein Rückfluss aus den Röhrchen bei der Entnahme unbedingt vermieden werden sollte. Roche-Röhrchen stehen unter Vakuum, daher Verschluss niemals abnehmen.
- Roche-Röhrchen stets vollständig füllen.
- Um eine gute Stabilisierung der Probe zu erreichen, nach dem Füllen das Roche-Röhrchen abziehen und 8-10mal über Kopf drehen (nicht schütteln!).
- Das Bestellformular vollständig ausfüllen, Patienteneinverständnis nicht vergessen.

Inhalt Transportbox

- 2 Roche-Blutröhrchen in Transportschutzgefässen und Plastiksack
- 2 Etiketten für die Patientenidentifikation
- 1 Probeleitfaden mit wichtigen Informationen zur Handhabung der Probe
- Bestellformular inkl. Patienteneinverständniserklärung

